



## ПРИЛОЖЕНИЕ BRAINTRONICS®

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## СОДЕРЖАНИЕ

Установка .....	2
Play Store   APP Store .....	2
Сканирование QR-кода .....	3
Приложение braintronics® .....	3
Создание аккаунта .....	3
Логин   Меню.....	4
Язык .....	4
Магазин.....	5
Мои продукты.....	5
Соединение с продуктом через Bluetooth .....	6
Медиа   Плеер.....	7
Новости.....	7
Контактная информация.....	7

**!** Перед началом использования braintronics® убедитесь, что ваше устройство от «Касада» подключено к источнику питания, что на вашем смартфоне/планшете включен Bluetooth и что у вас есть активное подключение к Интернету.

## УСТАНОВКА ЧЕРЕЗ APP STORE

1. Откройте Play Store / App Store на вашем телефоне или планшете.
2. Вбейте "braintronics®" в строку поиска.
3. Загрузите приложение braintronics®.



## УСТАНОВКА ЧЕРЕЗ QR-КОД

1. Отсканируйте этот QR-код через приложение для сканирования QR на вашем телефоне или планшете.
2. Загрузите приложение braintronics®.



## ПРИЛОЖЕНИЕ BRAINTRONICS®



## СОЗДАНИЕ АККАУНТА

При первом запуске приложения создайте аккаунт пользователя.

Для этого нажмите СОЗДАТЬ АККАУНТ.

(Изображение А)

Введите ваши данные, затем нажмите СОЗДАТЬ АККАУНТ. (Изображение В)



Изображение А



Изображение В

## ЛОГИН | МЕНЮ

Введите ваш адрес электронной почты и пароль, затем нажмите ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ. При входе в систему появится главное меню приложения.




## ЯЗЫК

Для выбора языка приложения нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу и выберите нужный язык. (Изображение А)

Вернитесь в главное меню, нажав значок стрелки в верхнем левом углу или кнопку «Назад» вашего смартфона/планшета.

(View B)

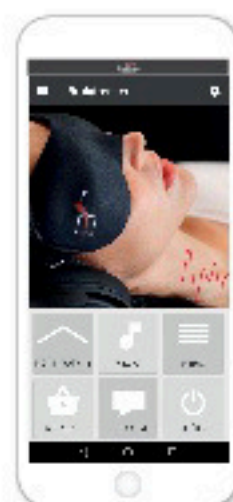

Изображение А



Изображение В

## МАГАЗИН

Выберите язык, на котором вы хотите воспроизвести трек. (Изображение А)

Выберите одну из категорий для вашей проговариваемой медитации или музыки для расслабления. (Изображение В)

Выберите трек. (Изображение С)

Подтвердите вашу покупку, нажав кнопку КУПИТЬ. (Изображение D)

Чтобы получить доступ к подробному меню, нажмите значок меню в виде трёх линий в верхнем левом углу. (Изображение E)



Изображение А




Изображение В



Изображение С



Изображение D

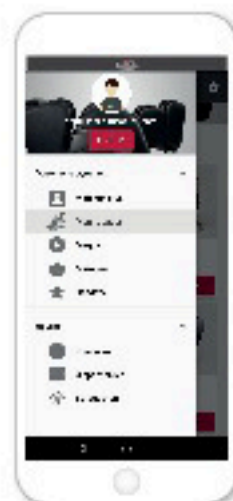

Изображение E

## МОИ ПРОДУКТЫ

В МОИХ ПРОДУКТАХ вы можете зарегистрировать приобретенный вами продукт «Касида» с функцией braintronics®. (Изображение А)

Затем вы можете быстро и легко выбрать нужный продукт из четко упорядоченного списка. (Изображение В)



Изображение А



Изображение В

## СОЕДИНЕНИЕ ПО BLUETOOTH С ПЛАТФОРМОЙ ANDROID

Выберите УСТРОЙСТВА в меню. *(Изображение А)*

Нажмите РАЗРЕШИТЬ. *(Изображение В)*

Из списка доступных устройств выберите желаемый продукт «Касада» и подключитесь, используя «1234». *(Изображение С)*


## СОЕДИНЕНИЕ ПО BLUETOOTH С ПЛАТФОРМОЙ IOS

Выберите УСТРОЙСТВА в главном меню. *(Изображение А)*

Если Bluetooth ещё не активирован *(Изображение D)*, сдвиньте кнопку в верхней части экрана вправо, чтобы она загорелась зелёным цветом.

*(Изображение E)*

Из списка доступных устройств выберите продукт «Касада», который вы хотите использовать. *(Изображение E)*

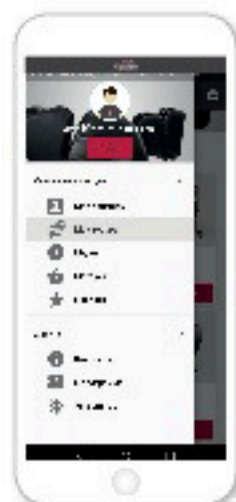

Изображение А



Изображение В



Изображение С




Изображение D



Изображение E

## МЕДИА | ПЛЕЙЕР

Перейдите в пункт меню МЕДИА и выберите нужный трек. После подтверждения устройство включится автоматически и одновременно запустит дорожку и программу массажа braintronic®. Вы можете приостановить воспроизведение трека, чтобы выйти из приложения раньше или выбрать другой.

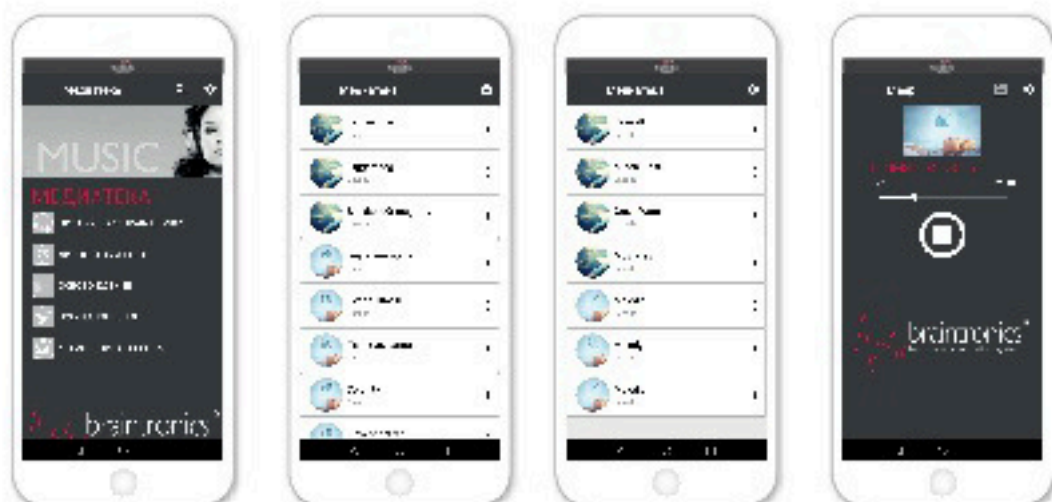

## НОВОСТИ

В этом разделе вы будете получать информацию о загрузке новых треков. Мы также публикуем интересные статьи/информацию по соответствующим темам, таким как стресс, расслабление, массаж и медитация и т. д.

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Касада Интернешнл ГмбХ»  
Обермайерс Фельд 3  
Падерборн, Германия, 33104  
[development@casada.com](mailto:development@casada.com) | [www.casada.com](http://www.casada.com)



Copyright Images and text are subject to the copyright of CASADA International GmbH and may not be used without express consent.

Copyright © 2018 CASADA International GmbH.

